

TS *Transfer Sto*♂*ol*



Direction and assembly manual for **TS**
Transfer Sto♂*ol*

It is important to read this before using the **TS**

The transfer stool can tip sideways or backwards if too much outward pressure is put on the support bars.



Assembly

The **TS** is easily assembled by pressing in a button at the bottom of the legs, connect them under the seat by pressing the legs into a locking position.



Fig 1. Press inwards to fasten or release a leg.

The back rail and the hand rail are assembled by pressing the button at the top, and inserting it in the hole at the top of the **TS**. The hand rail can be fastened on the left or right side of the seat.

When disassembling the **TS**, turn it upside down, press the buttons (see Ved demontering av rygg og håndtak presses knappene inn og rygg og håndtak kan tas av.

TS kan også leveres med en pute som gir litt trykkavlastning og som er vanntett.

Det kan også leveres en sekk for å gjøre transport og oppbevaring enklere.

TS mål, vekt.

Mål: Sammenlagt b 45 cm, d 32,5 cm, h 4 cm.

Oppslått b 52 cm, d 38 cm, h 49 cm.

Vekt: 2,8 kg.

Brukervekt: 120 kg.

Bruksanvisning pute.

Puten er laget av skum / luft. Med ventilen kan hardheten justeres. Den gir noe trykkavlastning, men er ikke en trykkavlastnings pute.


Når puten er pakket ut, må ventilen åpnes ved å skru den mot klokken. Puten vil da fylles med luft. Steng ventilen, skru med klokken. Sett deg på puten og slipp ut ønsket mengde luft.



Pute mål, vekt:

Mål: b 38cm, d 28cm, h 3,8 cm.

Vekt: 100 g.

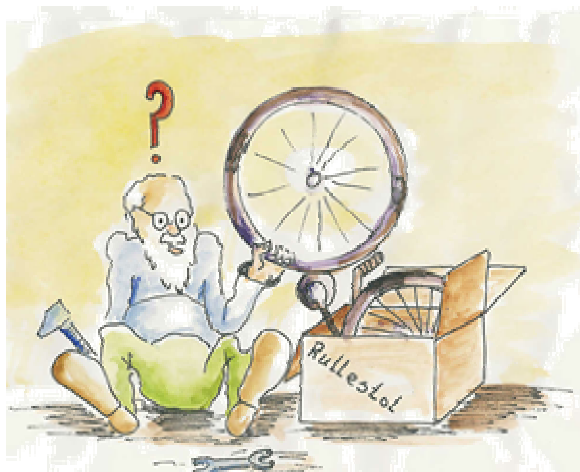

Produsent:

TS[®]
Transfer Sto[®]l

Gamle Bleikervei 33, N-1386 Asker

www.rullestol.no



Tlf. +47 911 76 250



Forhandler:

***molift*[®]**

Molift AS

Ole Deviks vei 44

N-0668 Oslo

Sentralbord: +47 4000 1004

Telefax: +47 4000 1008

www.molift.com